



سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

ماشین همودیالیز FRESENIUS مدل 4008B

❖ راهنمای استفاده:

۱. کلید نشانگر I/O را فشار دهید.
۲. لوله ساکشن اسید یا استات را در ظرف کنستانتیره (یا محلول) قرار دهید. (لوله مکش قرمز رنگ)
۳. کلید Test چشمک زن را فشار دهید.
۴. اگر از محلول بی کربنات استفاده می نمایید:
 - کلید بالای صفحه Interlock را برای باز شدن صفحه فشار دهید و صفحه Interlock را ۱۸۰ درجه بچرخانید.
 - ورقه نازک روی بسته Bibag را باز نمایید.
 - بسته Bibag را روی صفحه Interlock قرار دهید.
 - دو طرف صفحه Interlock را همزمان به طرف داخل فشار دهید تا بسته Bibag متصل گردد.

❖ عملکرد تست اصلی:

نمایش مراحل تست : Test In Progress

Check statues LEDs

All UF – Display OFF

CHECK UF for 8888

تستها شامل:

By Pass- opt detector- Blood System- Air Detector- temperature- POS- Pressure

- چنانچه دستگاه مشکل نداشته باشد **T1 Test Passed** نمایان می شود.
- دستگاه آماده **Prime** می باشد. چنانچه دستگاه در هنگام تست **Prime** شده باشد **Preparation** نمایش داده می شود.
- در انتهای نشانگر تست خاموش
- نشانگر پرایم چشمک زن
- نشانگر **Dialysis start** چشمک زن
- نشانگر **Alarm tone mute** چشمک زن
- همراه با سیگنال صوتی
- صدا بعد از چند ثانیه به طور اتومات قطع می شود.



سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

❖ مراحل جداسازی:

۱. در انتهای دیالیز برنامه 8 دستگاه Bibag را تخلیه نمایید.
۲. Bibag را در محل خود قرار دهید.
۳. لوله ساکشن را در محفظه خود قرار دهید. (کنستانت)
۴. در انتها از برنامه های شستشو استفاده نمایید.

شستشو با آب Prog1: rinse

شستشو با آب گرم Prog2: hot rinsing

شستشو با محلول ضد عفونی کننده : disinfection



جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران